

Instrucciones para recolección de especímenes de cary-blair

Acutis Reveal™ prueba de infección gastrointestinal (GIT)

Materiales



Pasos

1

Haga que el paciente obtenga la muestra de heces.



El paciente debe escribir su nombre, fecha de nacimiento y fecha en la etiqueta del tubo.

2



El paciente debe colocar el T-hat en la parte posterior del inodoro.

3

El paciente debe evacuar las heces en el T-hat. Las heces no deben obtener orina ni agua.

4




Despegue el paquete del kit y retire el medio optiswab fecal y el aplicador de hisopos flocados.

5

Acūtis Reveal™ GIT


6

Recoja una pequeña cantidad de heces insertando la punta del hisopo flocado en la muestra de heces y girándola. Deben seleccionarse y tomarse muestras de las áreas con sangre, viscosas o acuosas de las heces.

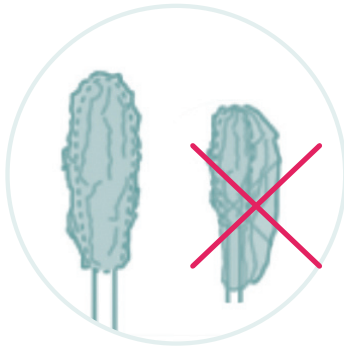


Después de la recolección, examine el hisopo para asegurarse de que haya material fecal visible en la punta. La punta del hisopo solo debe cubrirse con material de muestra.

7

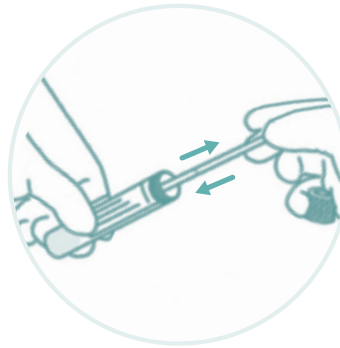

Sosteniendo el eje del hisopo entre el pulgar y el índice. Aplaste y mezcle la muestra de heces contra el costado del tubo para dispersar y suspender uniformemente la muestra en el medio de conservación.

8

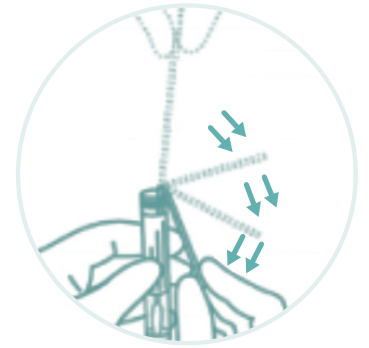

Sosteniendo el eje del hisopo cerca del borde del tubo, dóblelo en un ángulo de 180 grados para romperlo en el punto de ruptura marcado.

9

10



Deseche la parte superior rota del eje del hisopo y apriete la tapa. Coloque el tubo en la bolsa de riesgo biológico.

11



El paciente debe lavarse bien las manos.

12



Coloque todo lo que haya usado para recolectar la muestra en una bolsa de basura, átelo y tírelo a la basura.

13



Envíe la muestra al laboratorio.

Instrucciones de envío

- Confirme que una etiqueta legible de la parte superior de la solicitud de Acutis Reveal™ esté adherida al tubo de muestra
- Coloque el tubo en el compartimento sellado de la bolsa de muestras
- Asegúrese de incluir en la bolsa de muestras lo siguiente:
 1. Formulario de solicitud de prueba
 2. Datos demográficos del paciente
 3. Copia del anverso y reverso de la tarjeta de seguro
 4. Registros médicos que indiquen la necesidad médica y los medicamentos recetados
- Coloque la bolsa de muestra en FedEx / UPS Lab Pak, pegue la etiqueta de devolución prepaga y programe una recolección.
- Envíe a Acutis Diagnostics, 400 Karin Lane, Hicksville, NY 11801