


Instrucciones para la recogida de muestras Prueba Acutis Reveal™ COVID-19


Debido a la escasez de suministros a nivel nacional relacionada con el COVID-19, es posible que los hisopos nasofaríngeos no estén disponibles. Algunos hisopos, generalmente indicados para otros usos, han sido probados y aprobados por los CDC para su uso en pruebas de COVID-19.

El médico debe determinar el método de recolección según el tipo de hisopo y la anatomía nasofaríngea del paciente.

Opción 1: Determinar si el hisopo nasofaríngeo singular se puede utilizar para recoger una muestra de la nasofaringe. En caso afirmativo, proceda de la siguiente manera:

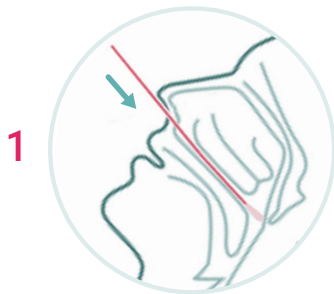

Inserte el hisopo en una fosa nasal hacia atrás, NO hacia arriba, y horizontalmente hacia la nasofaringe hasta que encuentre resistencia.

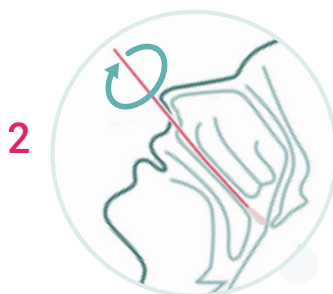

Gire el hisopo hasta cinco veces y manténgalo en su lugar durante 5 a 10 segundos para recolectar materiales de muestra.




Inserte el hisopo en el medio de transporte viral.



Rompa los mangos del hisopo en la línea del punto de ruptura.

Opción 2: Si no se puede usar el hisopo nasofaríngeo singular para recolectar una muestra de la nasofaringe, obtenga una muestra nasal de la siguiente manera:


Nota: esta opción puede ser autoadministrada por el paciente.

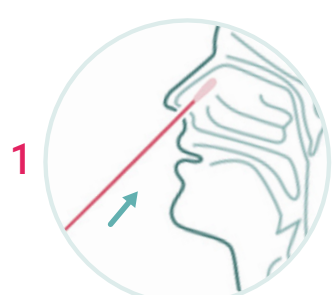


Mientras gira suavemente el hisopo, insértelo menos de una pulgada en la fosa nasal.



Gire el hisopo varias veces contra la pared nasal y repita en la otra fosa nasal usando el mismo hisopo.

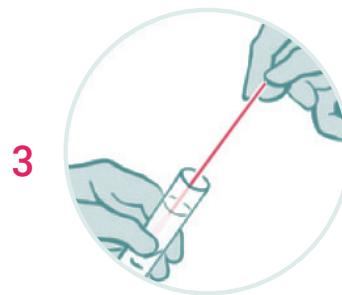

Inserte el hisopo en el medio de transporte estéril.

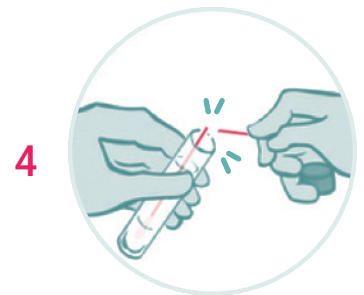

Rompa los mangos del hisopo en la línea del punto de ruptura.

Para ambas opciones

A




Vuelva a colocar la tapa y apriete para asegurar.

B



Etiquete el vial con la información del paciente y envíelo al laboratorio para su análisis.

C

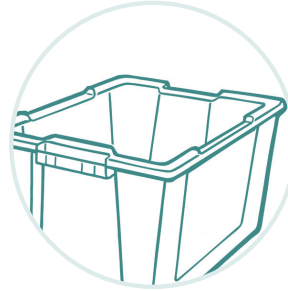

Deseche el equipo de protección personal en un recipiente de desechos apropiado.

D



Lávese bien las manos

Instrucciones de envío

- Confirme que una etiqueta legible de la parte superior de la solicitud de Acutis Reveal™ esté adherida al tubo de muestras
- Coloque el tubo en el compartimento sellado de la bolsa de muestras
- Asegúrese de incluir en la bolsa de muestras lo siguiente:
 1. Formulario de solicitud de prueba
 2. Copia del anverso y reverso de la tarjeta de seguro
 3. Datos demográficos del paciente
 4. Registros médicos que indiquen la necesidad médica y los medicamentos recetados
- Coloque la(s) bolsa(s) de muestra completa(s) en la caja protectora provista
- Coloque la caja protectora que contiene la(s) bolsa(s) de muestras en el Lab Pak de FedEx/UPS y selle el Lab Pak.
- Pegue la etiqueta de devolución prepaga en el Lab Pak y programe una recolección.
- Enviar a Acutis Diagnostics, 400 Karin Lane, Hicksville, NY 11801