

## Instrucción para Recolección de muestras de ITS

### Acutis Reveal™ ITS

#### Recolección de muestras de hisopos rectales

##### Materiales



Guantes

+



Hisopo rectal

+



Tubo de transporte  
de muestras  
(naranja)



##### Pasos

# ITS



Antes de recolectar la muestra, verifique la fecha de vencimiento del dispositivo de recolección. Si está vencido, no lo use y deséchelo inmediatamente.

2

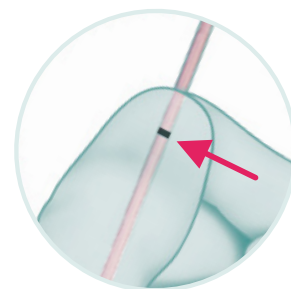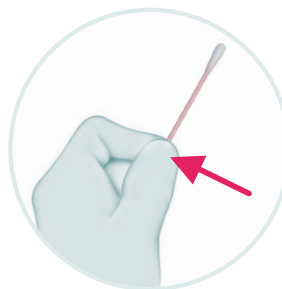


Abra parcialmente el paquete del hisopo y retire el hisopo. No toque la punta blanda ni deje el hisopo hacia abajo. Si la punta blanda se toca, se deja caer o se deja caer, deséchela y obtenga un nuevo kit de recolección de muestras de torunda multiprueba Aptima.

Sostenga el hisopo, colocando el pulgar y el índice en el medio del eje que cubre la línea marcada negra. No sostenga el eje por debajo de la línea marcada.


# Acūtis Reveal™ ITS

3

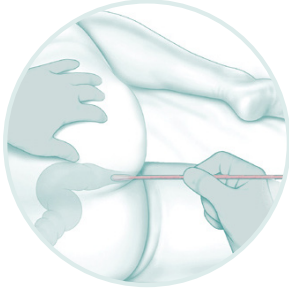

Inserte con cuidado el hisopo en el recto aproximadamente 1-2 pulgadas (3-5 cm) más allá del margen anal (la parte exterior del ano) y gire suavemente el hisopo en el sentido de las agujas del reloj durante 5-10 segundos. Retire el hisopo sin tocar la piel.

4

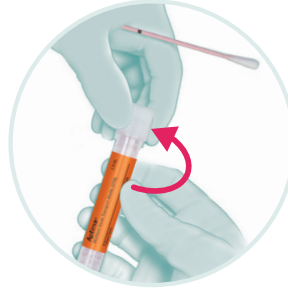

Mientras sostiene el hisopo en la mano, desenrosque la tapa del tubo. No derrame el contenido del tubo.

*Nota: Si se derrama el contenido del tubo, deséchelo y sustitúyalo por una nueva colección de especímenes en torunda para pruebas múltiples Aptima.*

5



Inmediatamente coloque el hisopo en el tubo de transporte de modo que la línea negra marcada quede en la parte superior del tubo.

6



Alinee la línea marcada con el borde superior del tubo y rompa el eje con cuidado.


Deseche la parte superior del eje.

7



Enrosque firmemente la tapa en el tubo. Al recolectar múltiples muestras del mismo paciente, la etiqueta del tubo proporciona un campo de fuente de muestra para una identificación única para la ubicación de la muestra.

8

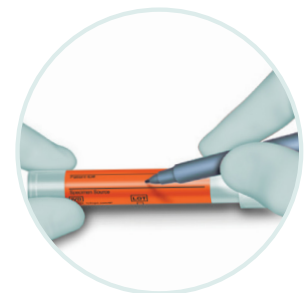

Identifique la muestra y complete la solicitud utilizando el nombre del paciente, la fecha de nacimiento, la fecha y hora de recolección de la muestra y las iniciales del recolector de muestras para el transporte al laboratorio.

## Instrucciones de envío

- Confirme que una etiqueta legible de la parte superior de la solicitud de Acutis Reveal™ esté adherida al tubo de muestras
- Coloque el tubo en el compartimento sellado de la bolsa de muestras
- Asegúrese de incluir en la bolsa de muestras lo siguiente:
  1. Formulario de solicitud de prueba
  2. Copia del anverso y reverso de la tarjeta de seguro
  3. Datos demográficos del paciente
  4. Registros médicos que indiquen la necesidad médica y los medicamentos recetados
- Coloque la(s) bolsa(s) de muestra completa(s) en la caja protectora provista
- Coloque la caja protectora que contiene la(s) bolsa(s) de muestras en el Lab Pak de FedEx/UPS y selle el Lab Pak.
- Pegue la etiqueta de devolución prepaga en el Lab Pak y programe una recolección.
- Enviar a Acutis Diagnostics, 400 Karin Lane, Hicksville, NY 11801