

Instrucción para Recolección de muestras de ITS

Acutis Reveal™ ITS

Recolección de muestras de hisopos genitales

Materiales



Guantes

+



Hisopado genital

+



Tubo de transporte de muestras (naranja)

Pasos

1


Antes de recoger la muestra, verifique la fecha de vencimiento del dispositivo de recolección. Si está vencido, no lo use y deséchelo inmediatamente.



2

Abra parcialmente el paquete de hisopos y retire el hisopo. No toque la punta blanda ni deje el hisopo hacia abajo. Si la punta blanda se toca, se deja caer o se deja caer, deséchela y obtenga un nuevo kit de recolección de muestras de torunda multiprueba Aptima.

Sostenga el hisopo, colocando el pulgar y el índice en el medio del eje que cubre la línea negra marcada. No sostenga el eje por debajo de la línea marcada.

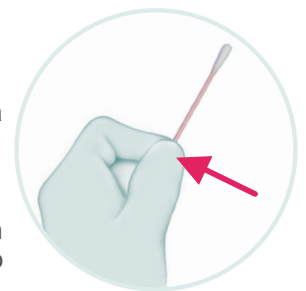

3 (a & b)


Para niños y hombres

Ver **imagen 3a** si el paciente está circuncidado (sin prepucio) o **imagen 3b** si el paciente no está circuncidado.

Los hombres no circuncidados deberán enrollar el prepucio antes de comenzar la recolección. Sostenga el pene con la mano libre (mano sin hisopo).

Con la otra mano (con el hisopo), enrolle el hisopo justo en la punta o fuera de la abertura del pene a través de la cual pasa la orina.

Asegúrese de enrollar el hisopo completamente alrededor de la abertura para obtener la mejor muestra. No es necesario introducir el hisopo en el interior de la abertura del pene.

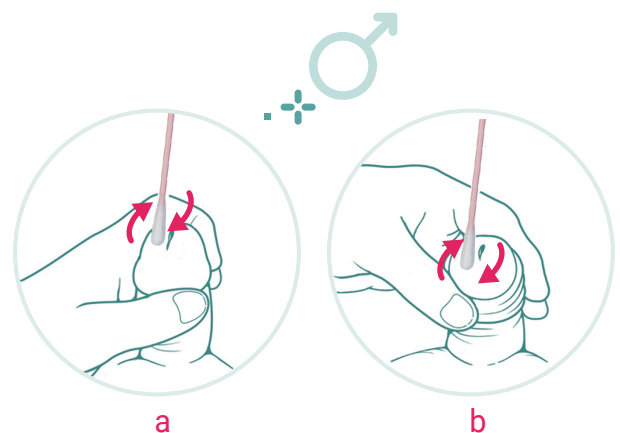

Acūtis Reveal™ ITS

3


Para niñas y mujeres



Inserte con cuidado el hisopo en la vagina aproximadamente 2 pulgadas más allá del introito y **gire suavemente el hisopo durante 10 a 30 segundos**. Asegúrese de que el hisopo toque las paredes vaginales para que el hisopo absorba la humedad. Retirar el hisopo sin tocar la piel.

4

Para hombres y mujeres

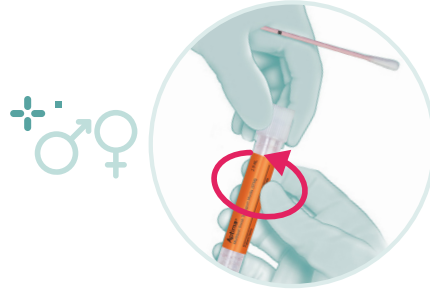

Mientras sostiene el hisopo, desenrosque la tapa del tubo. No derrame el contenido del tubo. Si se derrama el contenido del tubo, deséchelo y sustitúyalo por un nuevo kit de recogida de muestras en torunda multiprueba Aptima.

5




Inmediatamente coloque el hisopo en el tubo de transporte de modo que la línea negra marcada quede en la parte superior del tubo.

6




Alinee la línea marcada con el borde superior del tubo y rompa el eje con cuidado. Deseche la parte superior del eje.

7

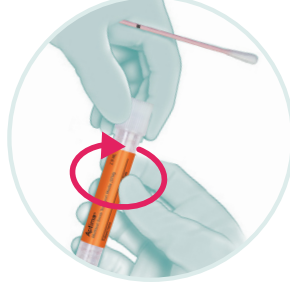

Enrosque firmemente la tapa en el tubo. Al recolectar múltiples muestras del mismo paciente, la etiqueta del tubo proporciona un campo de fuente de muestra para una identificación única para la ubicación de la muestra.

8

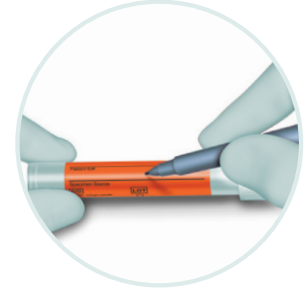

Identifique la muestra y complete la solicitud utilizando el nombre del paciente, la fecha de nacimiento, la fecha y hora de recolección de la muestra y las iniciales del recolector de muestras para el transporte al laboratorio.

Instrucciones de envío

- Confirme que el nombre del paciente, la fecha de nacimiento y la fecha de recolección sean legibles en el vial.
- Coloque el tubo en el compartimento sellado de la bolsa de muestras.
- Asegúrese de incluir en la bolsa de muestras los siguientes elementos:
 1. Datos demográficos del paciente del formulario de solicitud de prueba
 2. Copia del anverso y reverso de la tarjeta de seguro
 3. Expedientes médicos que indiquen necesidad médica
- Coloque la(s) bolsa(s) de muestras completas en el FedEx/UPS Lab Pak y séllelo.
- Coloque la etiqueta de devolución prepaga en el Lab Pak y programe una recogida.
- Enviar a Acutis Diagnostics, 400 Karin Lane, Hicksville, NY 11801