

Instrucción para

Recolección de muestras de ITU

Acutis Reveal™ ITU

Para pacientes

Materiales



Lavarse las manos



Copa de recogida de orina



Toallita de jabón de Castilla

Pasos

- 1 Antes de recolectar la muestra, verifique la fecha de vencimiento del dispositivo de recolección. Si está vencido, no lo use y deséchelo inmediatamente.
- 2 El paciente no debe haber orinado durante al menos 1 hora antes de la recolección de la muestra. Haga que el paciente se lave las manos y obtenga una muestra de orina en el recipiente de recolección de orina usando el método de recolección limpia.

Para niñas y mujeres

- a. Abra la copa de recolección de orina, no toque el interior.
- b. Siéntese en el inodoro con las piernas separadas, use dos dedos para abrir los labios.
- c. **Use la toallita estéril para limpiar los pliegues internos de los labios.**
Limpie de adelante hacia atrás.
- d. Manteniendo los labios abiertos, orine una pequeña cantidad en la taza del inodoro.
- e. Sostenga el recipiente para orina a unas pocas pulgadas de la uretra y orine hasta que el recipiente esté medio lleno.

Para niños y hombres

- a. **Limpie la cabeza del pene con la toallita estéril.**
Si no está circuncidado, retire primero el prepucio.
- b. Orine una pequeña cantidad en la taza del inodoro.
- c. Recoja una pequeña cantidad de orina en el vaso limpio o estéril, hasta que esté medio lleno.


Para coleccionistas de especímenes

Materiales



Pasos

- 1 Indique al paciente que entregue la muestra de orina a un profesional de la salud inmediatamente después de la recolección.
- 2 Transfiera la muestra al tubo de vacío **inmediatamente**:
 - a. Coloque la taza en posición vertical sobre una superficie limpia y plana. El recipiente se puede inclinar en ángulo si el volumen de la muestra es limitado.
 - b. Retire la etiqueta de la tapa para exponer el dispositivo de transferencia integrado. Nota: el médico debe llenar primero el tubo de ácido bórico y luego el tubo de análisis de orina.
 - c. Coloque el tubo de vacío en la cavidad de la tapa, con el tapón hacia abajo. Haga avanzar el tubo sobre el punto de punción para perforar el tapón.
 - d. Sostenga el tubo en su posición hasta que la muestra alcance la línea de llenado mínimo.
 - e. Retire el tubo del dispositivo de transferencia integrado.
 - f. Mezcle el tubo de 8 a 10 veces por inversión.
 - g. Vuelva a colocar la etiqueta sobre la cavidad del dispositivo de transferencia integrado y vuelva a sellar. Use caution to avoid contact with needle when replacing label.
 - h. Repita los pasos d a g con el tubo de análisis de orina (tapa jaspeada roja y amarilla).
 - i. Identifique la muestra y complete la solicitud utilizando el nombre del paciente, la fecha de nacimiento, la fecha y hora de recolección de la muestra y las iniciales del recolector de muestras para el transporte al laboratorio.
 - j. Trate el tapón de rosca del vaso como un objeto punzante contaminado y deséchelo en un contenedor de riesgo biológico aprobado para la eliminación de objetos punzantes según el procedimiento recomendado por su centro.

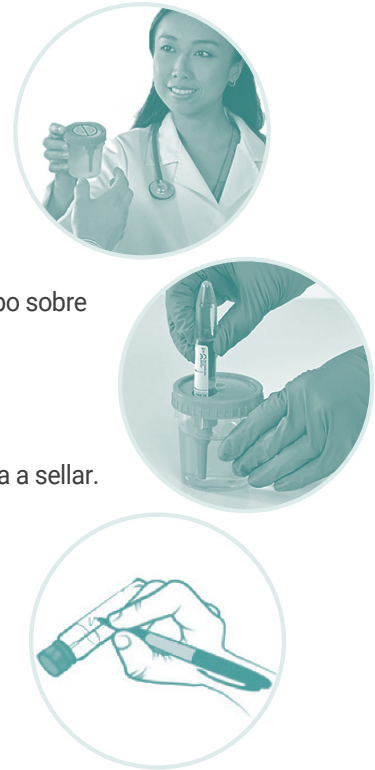

Instrucciones de envío

- Confirme que una etiqueta legible de la parte superior de la solicitud de Acutis Reveal™ esté adherida al tubo de muestras
- Coloque el tubo en el compartimento sellado de la bolsa de muestras
- Asegúrese de incluir en la bolsa de muestras lo siguiente:
 1. Formulario de solicitud de prueba
 2. Demográficos del paciente
 3. Copia del anverso y reverso de la tarjeta de seguro
 4. Registros médicos que indiquen la necesidad médica y los medicamentos recetados
- Coloque la bolsa de muestras en el FedEx/UPS Lab Pak
- Pegue la etiqueta de devolución prepaga y programe una recolección
- Enviar a Acutis Diagnostics, 400 Karin Lane, Hicksville, NY 11801