

Instrucción para nasofaríngea en medios de transporte universal

Acutis Reveal™ Prueba de infecciones respiratorias (IRA)

Materiales



Equipo de protección personal

+



Puritano UniTranz-RT

+



Marcador Sharpie

Pasos

1



Lávese las manos y póngase cualquier equipo de protección personal.

2



Abra el Puritan UniTranz-RT y retire el hisopo de flocado estéril de su paquete.


Acūtis Reveal™ IRA

3




Incline la cabeza de los pacientes ligeramente hacia atrás para enderezar las fosas nasales.

4

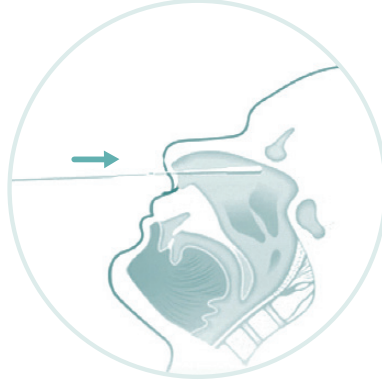

Inserte el hisopo en una fosa nasal hacia atrás, NO hacia arriba, y horizontalmente hacia la nasofaringe hasta que encuentre resistencia.

5

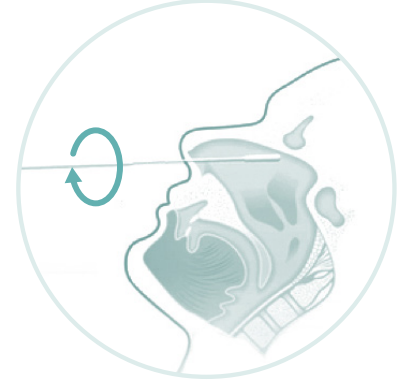

Gire el hisopo hasta cinco veces y manténgalo en su lugar durante 5 a 10 segundos para recolectar materiales de muestra.

6



Inserte el hisopo en el medio de transporte viral y rompa el asa en la línea del punto de ruptura.



Vuelva a colocar la tapa y apriete para asegurar. Etiquete el vial con la información del paciente y entregue las muestras al laboratorio para su análisis.

Instrucciones de envío

- Confirme que una etiqueta legible de la parte superior de la solicitud de Acutis Reveal™ esté adherida al tubo de muestras
- Coloque el tubo en el compartimento sellado de la bolsa de muestras
- Asegúrese de incluir en la bolsa de muestras lo siguiente:
 1. Formulario de solicitud de prueba
 2. Copia del anverso y reverso de la tarjeta de seguro
 3. Datos demográficos del paciente
 4. Registros médicos que indiquen la necesidad médica y los medicamentos recetados
- Coloque la(s) bolsa(s) de muestra completa(s) en la caja protectora provista
- Coloque la caja protectora que contiene la(s) bolsa(s) de muestras en el Lab Pak de FedEx/UPS y selle el Lab Pak.
- Pegue la etiqueta de devolución prepaga en el Lab Pak y programe una recolección.
- Enviar a Acutis Diagnostics, 400 Karin Lane, Hicksville, NY 11801