

Instrucción para recolección de muestras de fluidos orales

Prueba de fluidos orales

Pasos

1




Lávese las manos y póngase cualquier equipo de protección personal.

2

Asegúrese de que el donante espere al menos diez (10) minutos después de ingerir cualquier alimento, bebida o medicamento antes de la recolección.

3

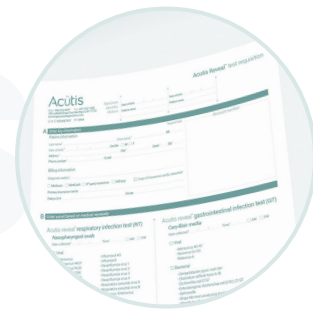

Identifique dos identificadores específicos del paciente y complete la solicitud usando el nombre del paciente, fecha de nacimiento, fecha y hora de recolección de la muestra e iniciales de el recolector de especímenes.

4



Antes de recolectar la muestra, verifique la fecha de vencimiento del dispositivo de recolección. Si está vencido, no lo use y deseche inmediatamente el dispositivo vencido. De lo contrario, abra el lado de la bolsa de aluminio que contiene la almohadilla de recolección de fluidos orales.

5




Utilice el eje de plástico del dispositivo para sacar la almohadilla de la funda de embalaje. No toque la almohadilla.

6



Coloque la almohadilla dentro de la boca debajo de la lengua, con el lado blanco del palito hacia arriba. Indique al donante que evite morder el eje de plástico.

7

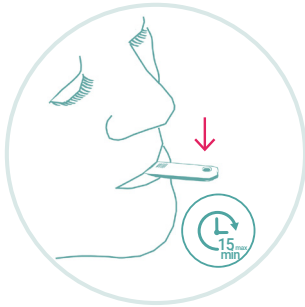


Comience a cronometrar el proceso de recolección. Mantenga la almohadilla debajo de la lengua hasta que el indicador se vuelva azul. Los tiempos promedio de recolección son de 3 a 4 minutos. Si el tiempo de recolección alcanza los 15 minutos, detenga la recolección y continúe con el paso 8.

8




Retire el vial de recolección de muestras orales del otro lado del paquete de aluminio. Despegue una etiqueta de la parte superior de la solicitud y colóquela en el dispositivo de recolección.

9

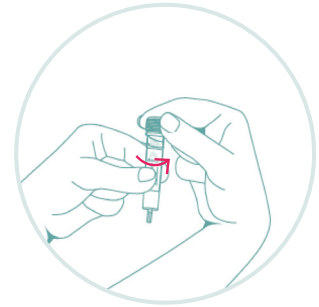


Sostenga el vial de recolección de muestras orales en posición vertical y desenrosque la tapa para abrir el vial. No derrame ni elimine de otro modo el líquido del vial.

10

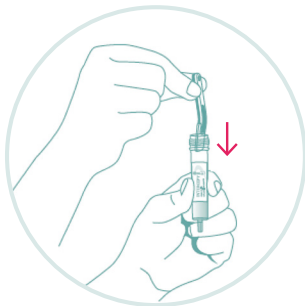

Una vez completada la recopilación, elimine la almohadilla de recolección de fluidos orales de la boca, insértela en el vial de recolección de muestras orales y empuje lentamente hacia abajo hasta que llegue al fondo del vial (la almohadilla se sumergirá en la solución conservante).

11

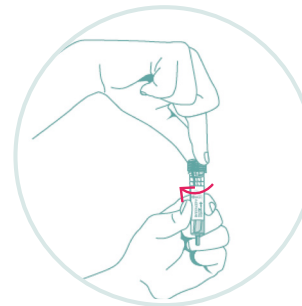

Enrosque la tapa en el vial de recolección de muestras orales.

12



Envasar la muestra y enviar al laboratorio.

Las instrucciones de uso están adaptadas del sitio web del fabricante www.orasure.com y www.intercept2.com. El dispositivo de recolección oral Intercept i2 es fabricado por OraSure Technologies, Inc (Bethlehem, PA). Acutis Diagnostics pone a su disposición estas instrucciones para su comodidad. Si tiene más preguntas o inquietudes, llámenos al 516-253-2171.

Instrucciones de envío

- Confirme que una etiqueta legible de la parte superior de la solicitud de Acutis Reveal™ esté adherida al tubo de muestras
- Coloque el tubo en el compartimento sellado de la bolsa de muestras
- Asegúrese de incluir en la bolsa de muestras lo siguiente:
 1. Formulario de solicitud de prueba
 2. Datos demográficos del paciente
 3. Copia del anverso y reverso de la tarjeta de seguro
 4. Registros médicos que indiquen la necesidad médica y los medicamentos recetados
- Coloque la(s) bolsa(s) de muestra completa(s) en la caja protectora provista
- Coloque la caja protectora que contiene la(s) bolsa(s) de muestras en el Lab Pak de FedEx/UPS y selle el Lab Pak.
- Pegue la etiqueta de devolución prepaga en el Lab Pak y programe una recolección.
- Enviar a Acutis Diagnostics, 400 Karin Lane, Hicksville, NY 11801